

CLEAN GLASSES

LIMPIADOR ANTIEMPAÑANTE

GENERALIDADES:

- NOMBRE COMERCIAL:** CLEAN GLASSES – SOLUCIÓN LIMPIADORA ANTIEMPAÑANTE
- COMPONENTES:** Alcohol N-Propílico, lauril sulfato de sodio, azul brillante No.1, Solución NaOH o HCl (ajuste pH), Agua purificada.
- TITULAR:** ITAL LENT S.A.S.
- FABRICANTE:** ITAL LENT S.A.S.
- REGISTRO SANITARIO:** NSOH01270-11CO
- PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Frasco PET x 60 mL Código EAN-13: 7707174408139
Frasco PET x 240 mL Código EAN-13: 7707174408146
- ALMACENAMIENTO:** Almacenar en su envase y empaque original a una temperatura menor a 30°C. No refrigerar o congelar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- VIDA ÚTIL:** 3 años a partir de la fecha de fabricación.

DATOS CLÍNICOS

- INDICACIONES DE USO:** Solución limpiadora y antiempañante para gafas o anteojos de vidrio, plástico o policarbonato, con antirreflejo. Útil para la limpieza de vidrio o cristal como ventanas, espejos, mesas, pantallas de computador, celulares, vidrios panorámicos de automóviles, etc.
- FRECUENCIA DE USO:** Diario y de acuerdo con la necesidad cada paciente.
- MODO DE EMPLEO:** Aplicar Clean Glasses con la válvula atomizadora sobre ambas superficies del lente. Frote suavemente con un paño seco y limpio de fibras naturales y/o suaves que no liberen partículas ni rallen la superficie del lente.
- CONTRAINDICACIONES:**
- No aplicar de ninguna manera en los ojos, no inhalar, no ingerir.
 - Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**
- CLEAN GLASSES es un producto que debe ser empleado exclusivamente en la limpieza de lentes de anteojos, gafas, vidrios, espejos, por lo tanto, nunca debe ser aplicado directamente en los ojos, no debe ser inhalado ni ingerido. Seguir las instrucciones de empleo indicadas en el envase.
 - Utilizar el producto antes de la fecha de expiración.
 - Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- SOBREEXPOSICIÓN:** En caso de contacto con los ojos, lavar el ojo con agua o solución salina por al menos 30 minutos y consultar al oftalmólogo.
- SENSIBILIDAD:** No se han reportado efectos adversos o desfavorables con el uso habitual de Clean Glasses. Sin embargo, en caso de presentarse alguna reacción desfavorable suspensa su uso y consulte al médico.

GENERALIDADES:

- NOMBRE COMERCIAL:** LIMPISOL – SOLUCIÓN LIMPIADORA
- COMPONENTES:** Lauril éter sulfato de sodio, nonil fenol etoxilado, trimetropim, EDTA, Solución NaOH o HCl (ajuste pH), agua purificada.
- TITULAR:** ITAL LENT S.A.S.
- FABRICANTE:** OPHARM LTDA.
- REGISTRO SANITARIO:** INVIMA 2017DM-0000164-R3. Invasivo - Riesgo IIb
- PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Caja plegadiza con un frasco x 30 mL. Código EAN-13: 7707174405053
- ALMACENAMIENTO:** Almacenar en su envase y empaque original a una temperatura menor a 30°C. Mantenga bien tapado, en lugares secos y protegido de la luz solar.
- VIDA ÚTIL:** 3 años a partir de la fecha de fabricación.

DATOS CLÍNICOS

INDICACIONES DE USO: Solución limpiadora para todo tipo de lentes de contacto gas permeable. Por sus agentes tensoactivos logra emulsificar las grasas, proteínas y demás residuos, eliminándolos fácilmente.

FRECUENCIA DE USO: Diario y de acuerdo con la necesidad cada paciente.

MODO DE EMPLEO: Lave siempre las manos antes de manipular los lentes de contacto. Remueva el lente de contacto y póngalo sobre la palma de la mano. Aplique 4 ó 5 gotas de LIMPISOL sobre una de las superficies del lente. Frote suavemente el lente con el dedo anular en forma circular. Enjuague con suficiente HUMECSOL ADVANCED frotando entre los dedos índice y pulgar. Guarde el lente de contacto en el estuche y aplique HUMECSOL ADVANCED hasta cubrirlo. Se recomienda lavar los lentes en la noche.

CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar de ninguna manera en los ojos.
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- LIMPISOL es un producto que debe ser empleado exclusivamente en la limpieza de lentes de contacto, por lo tanto, nunca debe ser aplicado directamente en los ojos.
- Siga las instrucciones de empleo indicadas en la caja plegadiza del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua o solución salina por al menos de 30 minutos y consulte al oftalmólogo.
- Evitar el contacto de la punta del gotero con cualquier superficie externa con el fin de prevenir la contaminación microbiológica del producto.
- Se recomienda desechar el producto después de un mes de ser abierto.
- Utilizar el producto antes de la fecha de expiración.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS: LIMPISOL NUNCA DEBE SER APLICADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS OJOS.

SENSIBILIDAD:

- **Trastornos oculares:** SIEMPRE: Dolor ocular, irritación ocular, ojo seco, sensación anormal en el ojo, erosión corneal, defecto del epitelio corneal, trastorno del epitelio corneal, visión borrosa.
- **Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:** Frecuencia no conocida: Dermatitis de contacto, piel seca.

GENERALIDADES:

NOMBRE COMERCIAL: HUMECOSOL ADVANCED – SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO

COMPONENTES: Alcohol polivinílico, hidroxietilcelulosa, PEG 6000, dextrosa monohidrato, poloxámero 407, NaCl, KCl, CaCl₂, MgCl₂, EDTA, trimetropim, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, solución NaOH o HCl (ajuste pH), agua purificada.

TITULAR: ITAL LENT S.A.S.

FABRICANTE: OPHARM LTDA.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2016DM-0003686-R1. No invasivo - Riesgo IIb

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

| | |
|---|------------------------------|
| Frasco PEBD x 30 mL | Código EAN-13: 7707174404032 |
| Caja plegadiza con un frasco x 60 mL | Código EAN-13: 7707174404049 |
| Caja plegadiza con un frasco x 120 mL | Código EAN-13: 7707174404056 |
| Caja plegadiza con dos frascos x 120 mL | Código EAN-13: 7707174404063 |

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase y empaque original a una temperatura menor a 30°C. No refrigerar o congelar. No guardar en el cuarto del baño.

VIDA ÚTIL: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

DATOS CLÍNICOS

INDICACIONES DE USO: Solución oftálmica estéril para el mantenimiento y cuidado de los lentes de contacto gas permeables.

FRECUENCIA DE USO: Diario y de acuerdo con la necesidad cada paciente.

MODO DE EMPLEO:

- **Limpieza:** Coloque el lente en la palma de la mano y aplique 4 o 5 gotas de Humecsol Advanced sobre una de las superficies del lente. Frótelo suavemente con el dedo anular en forma circular.
- **Enjuague:** Enjuague con suficiente Humecsol Advanced, frotando entre los dedos índice y pulgar.
- **Conservación y desinfección:** Guarde el lente de contacto limpio en el estuche y aplique suficiente Humecsol Advanced hasta cubrirlo totalmente. Para una mayor desinfección deje el lente de contacto por lo al menos 6 horas.
- **Humectación:** Remover el lente del estuche, enjuague con Humecsol Advanced. Agregue 4 o 5 gotas de Humecsol Advanced a la superficie del lente y colóquelo en el ojo.

CONTRAINDICACIONES:

- Ninguna conocida.
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si aparece irritación, dolor, enrojecimiento o cambios en la visión, suspenda el uso del producto y consulte al oftalmólogo.
- Evitar el contacto de la punta del gotero con cualquier superficie externa con el fin de prevenir la contaminación microbiológica del producto.
- Se recomienda desechar el producto después de un mes de ser abierto.
- Utilizar el producto antes de la fecha de expiración.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS: En caso de hipersensibilidad ocular, lavar el ojo con agua o solución salina. En caso de ingestión accidental consultar al médico, llevando el paciente junto con el envase del producto.

SENSIBILIDAD: Durante 30 años aproximadamente de uso de Humecsol Advanced, tanto pacientes como optómetras no han reportado ningún efecto adverso ni sensibilidad al producto.

GENERALIDADES:

NOMBRE COMERCIAL: HYDROSOL ADVANCED – SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO

COMPONENTES: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, poloxámero 407, PEG 6000, ácido bórico, trimetoprim, EDTA, solución NaOH o HCL (ajuste de pH), agua purificada.

TITULAR: ITAL LENT S.A.S.

FABRICANTE: OPHARM LTDA.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2016DM-0003682-R1. No invasivo - Riesgo IIb

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

| | |
|---|------------------------------|
| Frasco PEBD x 30 mL | Código EAN-13: 7707174406081 |
| Caja plegadiza con un frasco x 60 mL | Código EAN-13: 7707174406098 |
| Caja plegadiza con un frasco x 120 mL | Código EAN-13: 7707174406104 |
| Caja plegadiza con dos frascos x 120 mL | Código EAN-13: 7707174406111 |

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase y empaque original a una temperatura menor a 30°C. No refrigerar o congelar. No guardar en el cuarto del baño.

VIDA ÚTIL: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

DATOS CLÍNICOS

INDICACIONES DE USO: Solución oftálmica estéril para el mantenimiento y cuidado de los lentes de contacto blandos.

FRECUENCIA DE USO: Diario y de acuerdo con la necesidad cada paciente.

MODO DE EMPLEO:

- **Limpieza:** Coloque el lente sobre la palma de la mano y aplique 4 o 5 gotas de Hydrosol Advanced sobre una de las superficies del lente. Frótelo suavemente con el dedo anular en forma circular.
- **Enjuague:** Enjuague con suficiente Hydrosol Advanced, frotando entre los dedos índice y pulgar.
- **Conservación y desinfección:** Guarde el lente de contacto limpio en el estuche y aplique suficiente Hydrosol Advanced hasta cubrirlo totalmente. Para una mayor desinfección deje el lente de contacto por lo al menos 6 horas.
- **Humectación:** Remover el lente del estuche, enjuague con Hydrosol Advanced. Agregue 4 o 5 gotas de Hydrosol Advanced a la superficie del lente y colóquelo en el ojo.

CONTRAINDICACIONES:

- Ninguna conocida.
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si aparece irritación, dolor, enrojecimiento o cambios en la visión, suspenda el uso del producto y consulte al oftalmólogo.
- Evitar el contacto de la punta del gotero con cualquier superficie externa con el fin de prevenir la contaminación microbiológica del producto.
- Se recomienda desechar el producto después de un mes de ser abierto.
- Utilizar el producto antes de la fecha de expiración.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS: En caso de hipersensibilidad ocular, lavar el ojo con agua o solución salina. En caso de ingestión accidental consultar al médico, llevando el paciente junto con el envase del producto.

SENSIBILIDAD: Durante 30 años aproximadamente de uso de Humecsol Advanced, tanto pacientes como optómetras no han reportado ningún efecto adverso ni sensibilidad al producto.

GENERALIDADES:

NOMBRE COMERCIAL: HYDROCLEAN – SOLUCIÓN LIMPIADORA

COMPONENTES: Poloxamero 407, tween 20, trimetropim, EDTA, Solución NaOH o HCl (ajuste pH), agua purificada.

TITULAR: ITAL LENT S.A.S.

FABRICANTE: OPHARM LTDA.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2011DM-0000480-R1. Invasivo - Riesgo IIb

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja plegadiza con un frasco x 30 mL Código EAN-13: 7707174401017

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase y empaque original a una temperatura menor a 30°C. Mantenga bien tapado, en lugares secos y protegidos de la luz solar.

VIDA ÚTIL: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

DATOS CLÍNICOS

INDICACIONES DE USO: Solución limpiadora para todo tipo de lentes de contacto blando. Por sus agentes tensoactivos logra emulsificar las grasas, proteínas y demás residuos, eliminándolos fácilmente. Previene la formación de depósitos de proteína, siempre que los lentes de contacto se limpien diariamente posterior a su uso.

FRECUENCIA DE USO: Diario y de acuerdo con la necesidad cada paciente.

MODO DE EMPLEO: Lave siempre las manos antes de manipular los lentes de contacto. Remueva el lente de contacto y póngalo sobre la palma de la mano. Aplique 4 ó 5 gotas de HYDROCLEAN sobre una de las superficies del lente. Frote suavemente el lente con el dedo anular en forma circular. Enjuague con suficiente HYDROSOL ADVANCED frotando entre los dedos índice y pulgar. Guarde el lente de contacto en el estuche y aplique HYDROSOL ADVANCED hasta cubrirlo. Se recomienda lavar los lentes en la noche.

CONTRAINDICACIONES:

- No aplicar de ninguna manera en los ojos.
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- HYDROCLEAN es un producto que debe ser empleado exclusivamente en la limpieza de lentes de contacto, por lo tanto, nunca debe ser aplicado directamente en los ojos.
- Siga las instrucciones de empleo indicadas en la caja plegadiza del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua o solución salina por al menos de 30 minutos y consulte al oftalmólogo.
- Evitar el contacto de la punta del gotero con cualquier superficie externa con el fin de prevenir la contaminación microbiológica del producto.
- Se recomienda desechar el producto después de un mes de ser abierto.
- Utilizar el producto antes de la fecha de expiración.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS: HYDROCLEAN NUNCA DEBE SER APLICADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS OJOS.

SENSIBILIDAD:

- Trastornos oculares: SIEMPRE: Dolor ocular, irritación ocular, ojo seco, sensación anormal en el ojo, erosión corneal, defecto del epitelio, corneal, trastorno del epitelio corneal, visión borrosa.
- Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: Frecuencia no conocida: Dermatitis de contacto, piel seca.