

**Lentes de Contacto**  
**Blandos Torneados**  
**Blandos Desechables**

**BLAN**

# Trabajamos por su seguridad.

Estos lentes de contacto fueron fabricados con materiales aprobados y áreas certificadas bajo los lineamientos de calidad que establece el Invima. Para garantizar su seguridad y por cada proveedor de materiales y diseños con quienes trabajamos y quiénes nos dieron el aval para su manufactura.

**Importante:** Adoptando las medidas que establece la normatividad vigente, este producto debe ser adaptado por un especialista.

## **Registro Sanitario:**

Blandos Torneados: INVIMA 2019DM-0019840

Blandos Desechables: INVIMA 2019DM-0020290

# Materiales de máxima calidad.

Los materiales utilizados para la elaboración de estos lentes fueron importados legalmente y almacenados en una bodega con capacidad de almacenamiento avalada por el ente regulatorio.

Certificado de autenticidad del material emitido por el fabricante.

Certificado de Capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos, emitido por el INVIMA.

# Recomendamos Hydrosol Advanced.

Hydrosol Advanced es una solución multipropósito para el mantenimiento de todo tipo de lentes de contacto blandos hidrofílicos y siliconados.

Limpieza, enjuague, conservación, preservación y humectación.

**Presentaciones:**

240mL, 120mL, 60mL

**Registro Sanitario:** INVIMA 2016DM-0003682-R1

# Cuidado y mantenimiento.



Lave y seque sus manos muy bien.



Enjuague el lente de contacto con solución.



Llene el estuche con solución adecuada para lentes blandos.





Frote el lente con la yema de los dedos en la palma de su mano.



Guarde los lentes en el estuche y verifique que quede inmerso en la solución para evitar romperlo al cerrar el estuche.

# Instrucciones de inserción y remoción.

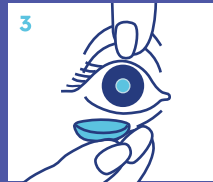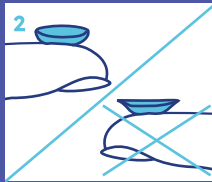

# Instrucciones de inserción y remoción.

- 1 Lave y enjuague sus manos y séquelas con una toalla que no suelte pelusas.
- 2 Coloque un lente en la yema del dedo, asegurándose de que esté en la posición correcta.
- 3 Separe y sujete ambos párpados con los dedos y sitúe el lente sobre la córnea.
- 4 Presione el lente ligeramente sobre el ojo y suelte los párpados lentamente. Repita con el otro lente.
- 5 Para extraer el lente sujete el párpado inferior, desplace el lente suavemente hacia abajo mientras mira hacia arriba.
- 6 Pellizque el lente suavemente con la yema del pulgar y del índice, nunca con las uñas, y retírelo.



---

VEMOS MÁS ALLÁ

[www.ital-lent.com](http://www.ital-lent.com)



ital\_lent



viendonos