

Lentes de Contacto
Rígidos Gas Permeables



Trabajamos por su seguridad.

Estos lentes de contacto fueron fabricados con materiales aprobados y áreas certificadas bajo los lineamientos de calidad que establece el INVIMA. Para garantizar su seguridad y por cada proveedor de materiales y diseños con quienes trabajamos y quiénes nos dieron el aval para su manufactura.

Importante: Adoptando las medidas que establece la normatividad vigente, este producto debe ser adaptado por un especialista.

Registro Sanitario: INVIMA 2019DM-0019840

Materiales de máxima calidad.

Los materiales utilizados para la elaboración de estos lentes fueron importados legalmente y almacenados en una bodega con capacidad de almacenamiento avalada por el ente regulatorio.

Certificado de autenticidad del material emitido por el fabricante.

Certificado de Capacidad de Producción de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular emitido por el INVIMA

Tratamiento de Superficie Plasmático.

Sus lentes cuentan con un avanzado tratamiento de superficie plasmático. Este tratamiento es un proceso en el cual las partículas de gas se ionizan en una cámara reactiva para potenciar la superficie del lente de contacto y obtener beneficios como:

- Mayor humectación de la superficie
- Limpieza más sencilla y eficaz
- Menor adhesión de partículas orgánicas
- Incremento de la comodidad

Recomendamos Humecsol Advanced.

Humecsol Advanced es una solución multipropósito para el mantenimiento de todo tipo de lentes de contacto rígidos (limpieza, enjuague, conservación, preservación y humectación). Humecta la superficie de los lentes de contacto. PH balanceado para mayor confort, amortiguando los efectos de irritación por la contaminación.

Presentaciones:

240mL, 120mL, 60mL

Registro Sanitario: INVIMA 2016DM-0003686-R1

También recomendamos:

- **Menicare Pure:** Solución para limpieza, enjuague, y almacenamiento. Desinfección efectiva contra bacterias y hongos después de 30 minutos y activo contra la ameba (trofozoito) en 4 horas. Uso diario.

Presentaciones:

250mL, Kit Menicare Pure 70mL + una dosis de Progent.

Registro Sanitario: INVIMA 2017DM-0017398

- **Progent:** Limpiador intensivo de desproteínización efectivo en sólo 5 minutos contra las bacterias, hongos, virus y Acanthamoeba. Uso Semanal.

Presentaciones:

5 dosis A y 5 dosis B con estuche Progent.

Registro Sanitario: INVIMA 2015DM-0014056

Cuidado y mantenimiento.



Lave y seque sus manos muy bien.



Enjuague el lente de contacto con solución.



Llene el estuche con solución adecuada para lentes RGP.






Frote el lente con la yema de los dedos en la palma de su mano.



Guarde los lentes en el estuche y verifique que quede inmerso en la solución para evitar romperlo al cerrar el estuche.

Instrucciones de inserción y remoción.

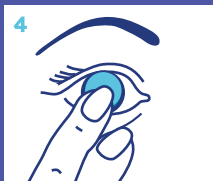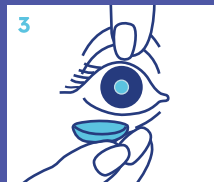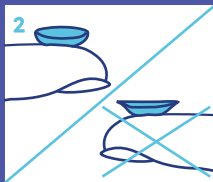

Instrucciones de inserción y remoción.

- 1 Lave y enjuague sus manos y séquelas con una toalla que no suelte pelusas.
- 2 Coloque un lente en la yema del dedo, asegurándose de que esté en la posición correcta.
- 3 Separe y sujete ambos párpados con los dedos y sitúe el lente sobre la córnea.
- 4 Presione el lente ligeramente sobre el ojo y suelte los párpados lentamente. Repita con el otro lente.
- 5 Para extraer el lente sujete el párpado inferior, desplace el lente suavemente hacia abajo mientras mira hacia arriba.
- 6 Pellizque el lente suavemente con la yema del pulgar y del índice, nunca con las uñas, y retírelo.



VEMOS MÁS ALLÁ

www.ital-lent.com



ital_lent



viendonos